

☑ 正常な呼吸がない

☑ 意識や反応がない

☑ 判断ができない

まずは119番通報をして
AED『ジェイパッドCU-SP1』
を使用します。

救命の連鎖



販売元
株式会社 ジェイ・エム・エス
<http://www.jms.cc>

製造元
株式会社 CUメディカルシステムズ
<http://www.cu911.com>

製造販売業者
株式会社 CU
〒105-0001
東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル8F
TEL: 03-6205-7385 FAX: 03-6205-7386
<http://www.japan-cu.com>
AED コールセンター ☎ 0120-910-256

(一社) 全日本難聴者・中途聴覚者団体連合会より
「耳マーク」の複製・利用について承諾を得ている




リファレンスガイドブック




JRC 蘇生ガイドライン 2015 準拠

ジェイパッド CU-SP1の 使用方法


成人・小児モードを
選択
電源ボタンを押す

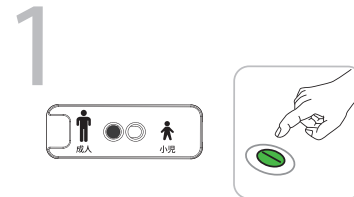

電極パッドを
貼る

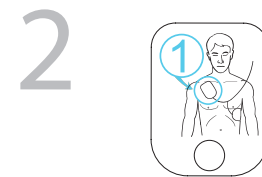

ショックボタンを
押す

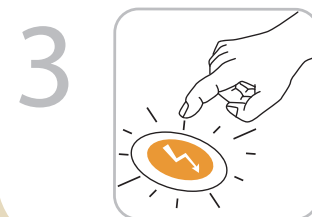


JMS
The Bridge to Good Health Care



ジェイパッド CU-SP1の 使用方法

8

心肺蘇生（CPR）について

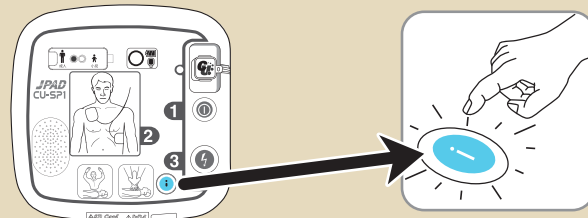

点滅している青い「i」ボタンを押してください。

救急隊に引き継ぐか傷病者に呼吸や目的のある
仕草が認められるまで、心肺蘇生を続ける




9

胸骨圧迫について

人工呼吸の技術と意思があれば
30：2で胸骨圧迫に人工呼吸を加える

※G2015より技術と意思があれば人工呼吸を行う

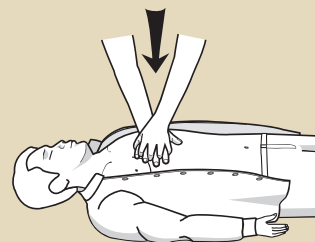


※3 CPRガイドスインジケーター
が点滅します

1分間に100回～120回の速さで強く・速く・絶え間なく行う。
成人では約5cm、小児では胸の厚さの三分の一。

※目的のある仕草が確認できた場合、心肺蘇生を中断し、救急車を待つ。AEDの電極パッドは剥がさず電源も入れた状態にしておく。

3


電極パッドを引き出す

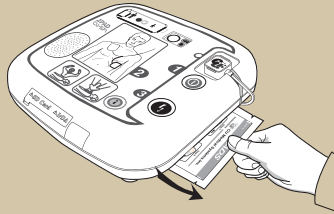

機器の底面にある電極パッドの袋を引き出し、袋を破いて袋の中の電極パッドを取り出してください。

4

電極パッドをはがす

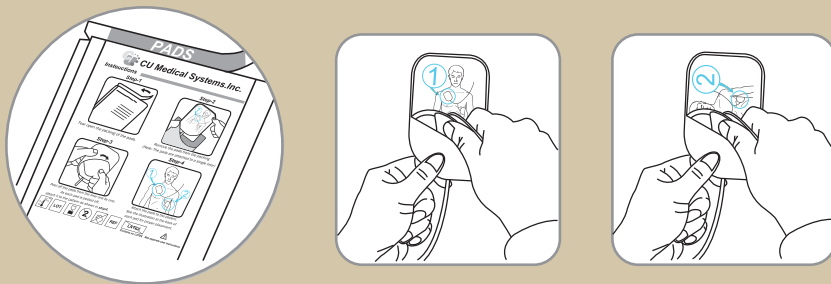

袋の中の電極パッドを取り出し、示している図を確認してシートからはがしてください。

2



5

電極パッドを貼る



※1 電極パッド確認インジケータが点滅します

成人

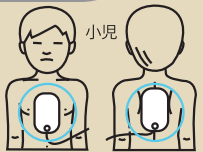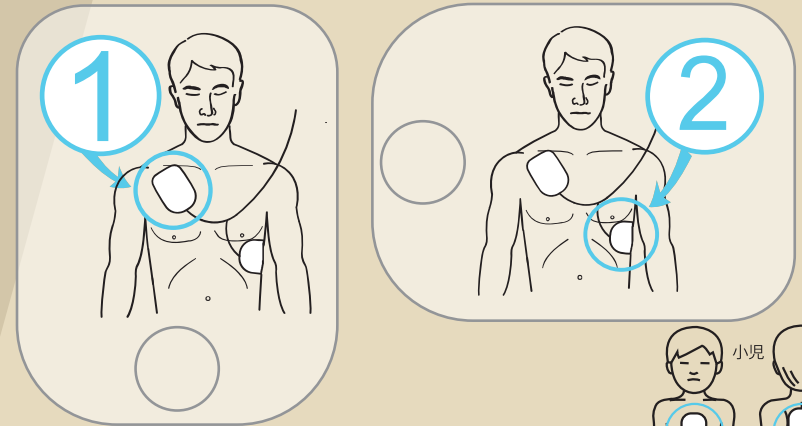


電極パッドに示している図を確認してシートからはがし、図のように貼ってください。

3



6

心電図解析中

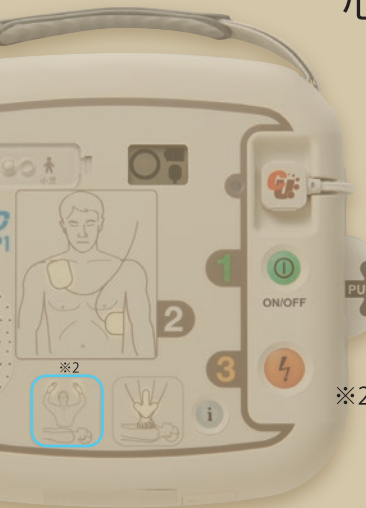


身体から
離れてください。

※2 退避指示インジケータが
点滅します

7

電気ショックボタン

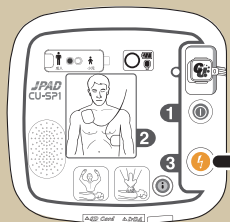


電気ショックボタンがオレンジ色で点滅するのを
確認してから押してください。
直ちに心肺蘇生を開始してください。

4

1

モード選択・電源 ON

成人：小学生以上
小児：未就学児およそ6歳未満


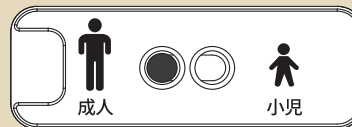


成人・小児モードを選択
電源ボタンを押してください。



2

衣服を脱がせる

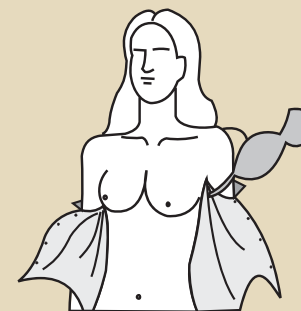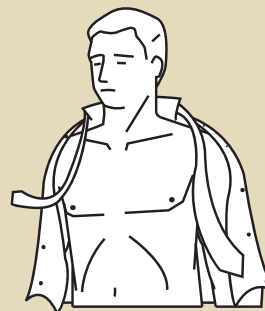

上半身の衣服を脱がせ胸をはだけます。
(時間を要する場合は切り裂いてください)

1

